

Procédure d'utilisation de l'appareil hématologie de marque URIT-3000 PLUS

1. Appuyer sur le Bouton d'allumage par derrière l'appareil



2. Attendre toutes la procédure d'initialisation du système et il affichera le tableau



3. Pour passer un Echantillon, Cliquer sur la touche INFO



4. Remplir les renseignements du patient puis appuyé sur OK pour valider

Nom


Prénoms

Age :

Limite : Général, Homme,
Enfant, Femme.

Num Spéci : Matricule

ID : Numéro Echantillon

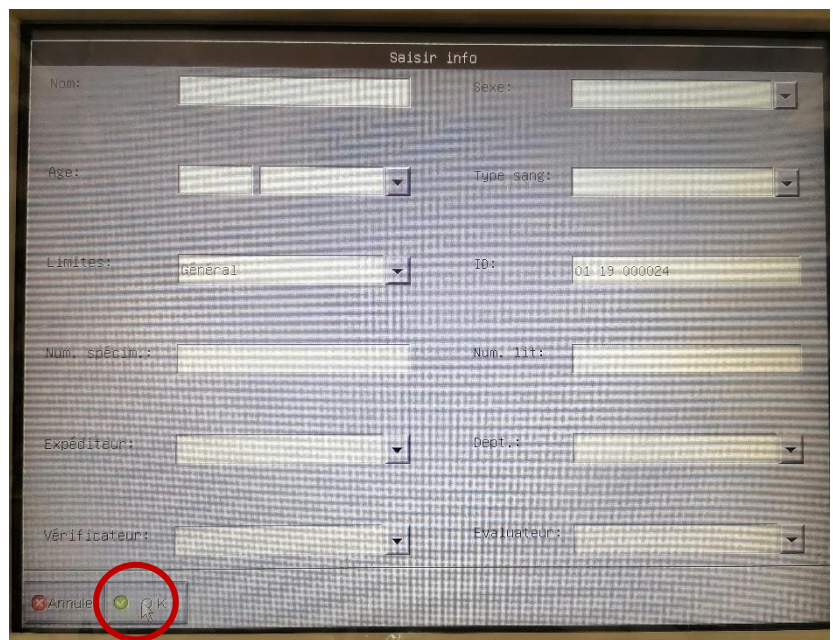

Saisir info

Nom: Sexe:

Age: Type sang:

Limite: ID:

Num. spécim.: Num. 111:

Expéditeur: Dept.:

Vérificateur: Evaluateur:

Agiter bien l'échantillon puis présenter le sous la sonde d'aspiration et appuyer sur la touche d'aspiration pour enfin aspirer l'échantillon ;

a) Appuyer sur le mode sorti



b) Appuyer sur (yes) pour confirme la sortie

c) Appuyer également sur (yes) pour continue


d) Transverse le probe cleaner dans le couvercle

e) Présenté liquide du probe sous la sonde d'aspiration

f) Appuyer sur **OK** et l'appareil aspirera le liquide puis nettoyer les tuyauteries avant l'extinction, et ensuite l'appareil vous demandera d'appuyer sur le bouton d'extinction qui est place derriere


I. Maintenance hebdomadaire

1) Cliquer sur Fonction

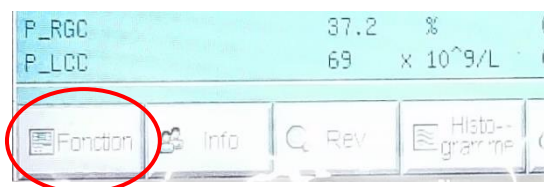

2) Cliquer sur la maintenance


3) Débouché orifice *flush orifice *vidange cuves* rinçage cuves* amorçage fluïdique *enfin rinçage fluïdique

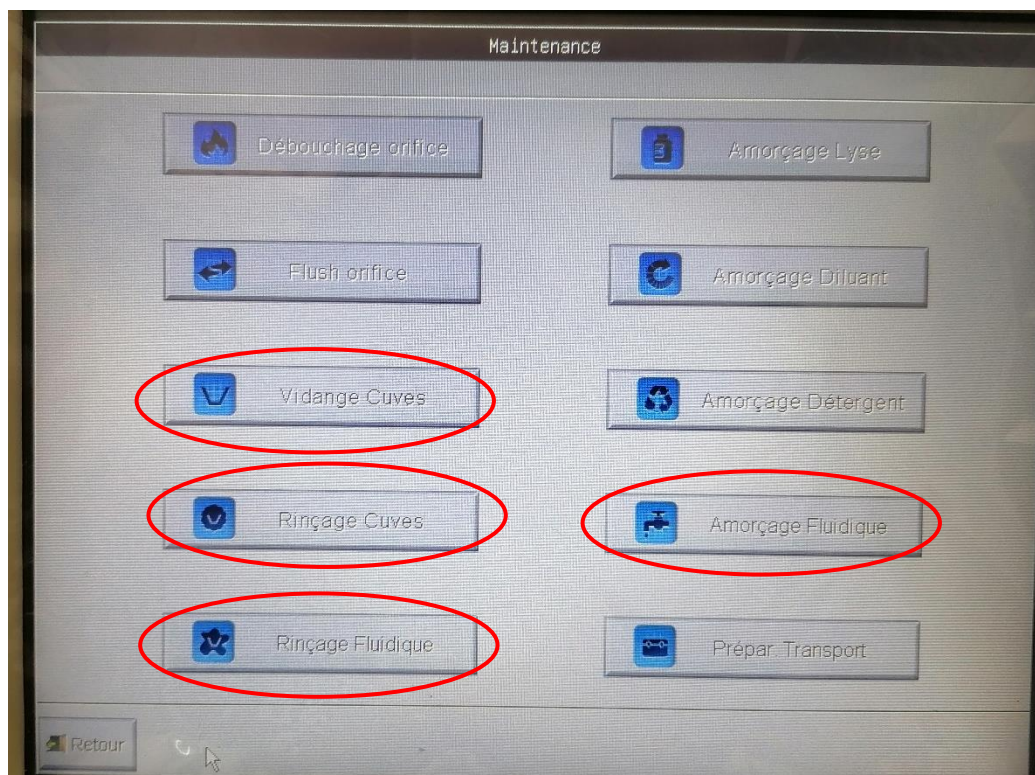

4) au niveau du rinçage fluïdique placée une petite quantité de probe clenear sous la sonde puis appuyée sur rinçage fluïdique.

Remplacer les réactifs

1. Cliquer sur la touche Fonction

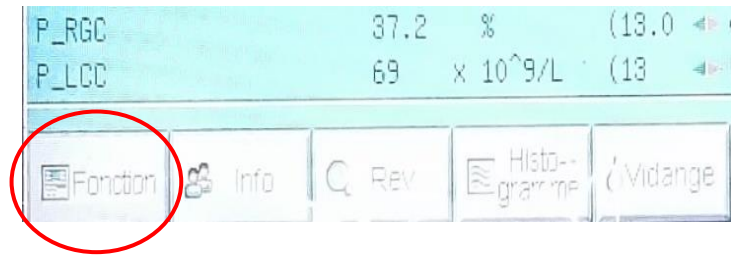

2. Appuyer sur maintenance




3. Amorcer le réactif concerne

Lyse : 1 litre

Diluent : 20 litres

Détergent : 20 litres

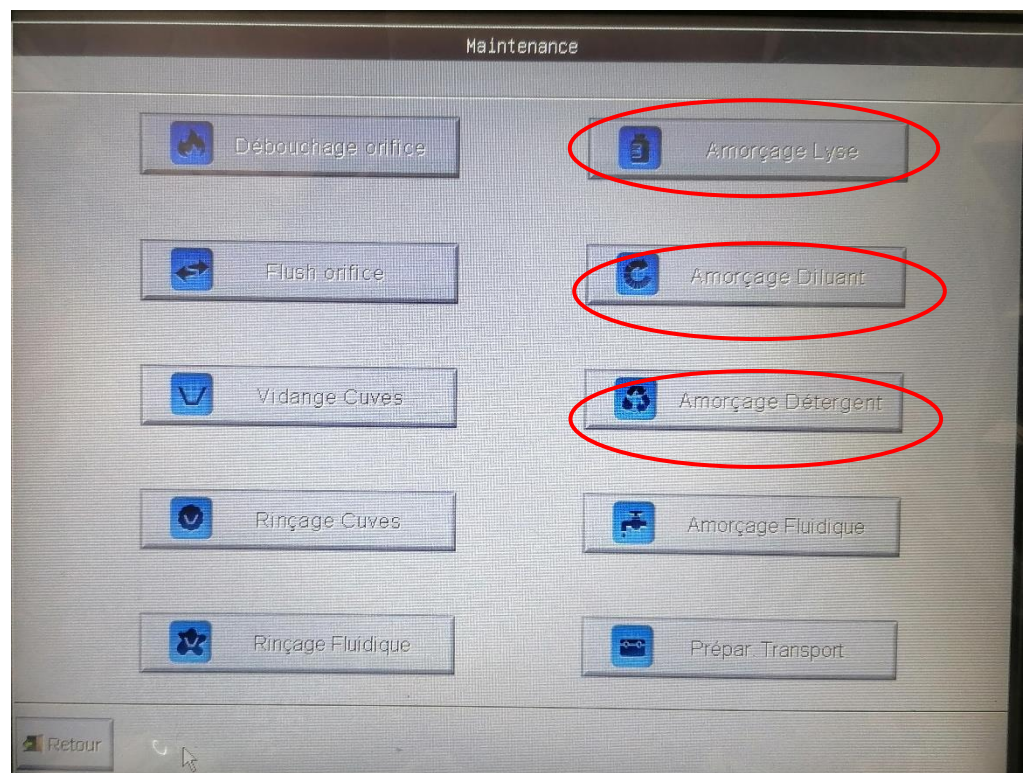

Les différents volumes aspirés par chaque réactif

- ✓ Diluent : 31ml
- ✓ Détergent : 8 ml
- ✓ Lyse : 0,7ml
- ✓ Sang total : 10 UI
- ✓ Sang capillaire : 20 UI

Contact :

Formateur : Moussa CISSE

E-mail : m9cisse@gmail.com

Téléphone : +224 622 16 60 98

Maintenancier :

TOLNO Youssoupha

Mail : youssouphatolno455@gmail.com

Tel : 622 564 397 WhatsApp : 622 564 397